



QUICKSTART GUIDE

HEMIPARESE SIMULATOR



Inleiding

De hemiparese simulator kan worden toegepast op zowel de linker- als rechterzijde van het lichaam. De hemiparese simulator kan apart, of in combinatie met accessoires van het ouderdomssimulatorpak GERT gebruikt worden. Het aanbrengen van de diverse onderdelen kan het best gedaan worden door een tweede persoon. Bij gebruik van de overschoenen, deze als eerste aantrekken.

Algemene veiligheidsadviezen

De simulatie van beperkingen op grond van leeftijd, ziekte of handicap brengt onvermijdelijk ook risico's met zich mee, zoals een verhoogd risico op ongevallen.

De simulatie van beperkingen moet daarom altijd met bijzondere voorzichtigheid plaatsvinden.

De producten mogen niet worden gebruikt bij mensen:

- Met reeds bestaande beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van leeftijd, ziekte of handicap.
- Met een verhoogd risico, zoals zwangere vrouwen, epileptici, met een neurologische of psychische ziekte, met hartklachten of een verhoogd risico op een beroerte.
- Met acute ziekten zoals infecties en huidaandoeningen.

Veel aandacht en voorzichtigheid zijn geboden bij kinderen en jongeren, maar ook bij mensen met cognitieve beperkingen of gedragsstoornissen.

Het gebruik van de producten kan alleen in een veilige omgeving en alleen onder toezicht van een vakkundig persoon plaatsvinden.

De toezichthouder is verantwoordelijk voor het gebruik. Dit moet ervoor zorgen dat de bovenstaande punten in acht worden genomen.

Naast deze algemene veiligheidsadviezen moeten de veiligheidsadviezen in de respectievelijke instructies in acht worden genomen.

Produkt + Projekt



Wolfgang Moll

Onderdelen

Gewichtsgordel voor de enkel (1x)

Wikkel strak rond de enkel. Het gewicht kan worden aangepast door er metalen staven uit te halen.

De gewichtsgordel simuleert een zwakke/stroeve buiging van het enkelgewricht, verlies van kracht en verlies van coördinatievaardigheden.



Kniespalk (1x)

Breng de spalk aan met de opening naar de voorkant en het kniegewricht op de juiste hoogte. Sluit deze strak door middel van de klittenbandsluiting. Het aantrekken kan het best staand gedaan worden.

De kniespalk simuleert verlamming en moeilijke buiging/mobiliteit.



Oordopjes

Oordopjes kunnen bij de testpersoon worden ingebracht. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met de gehoorbeschermer van het ouderdomssimulatorpak GERT.

De oordopjes simuleren eenzijdig gehoorverlies en een verwaarlozing van het gehoor.



Ooglapjes (2x)

Het ooglapje kan gedragen worden onder een bril en onder de bril van het ouderdomssimulatorpak GERT.

Het ooglapje simuleert eenzijdige visusstoornis en een verwaarlozing van het zicht.



Houten lepels

Een houten lepel simuleert gezichts- verlamming, spraak- en slikstoornissen.

Kan door iets vergelijkbaars worden vervangen.



Mitella (1x)

De band van de mitella kan in lengte worden aangepast.

De mitella simuleert de spasticiteit van de flexor (onderarmspier) en verlamming.



Wandelstok (1x)

Stel de wandelstok af op de juiste lengte.

De wandelstok maakt stabilisatie tijdens gewichtsverplaatsing mogelijk.



Let op

Door het aantrekken van het hemiparese simulator kunnen minder sterke personen, of personen met gezondheidsproblemen overmatig belast worden. Elke proefpersoon dient naar zijn gezondheidstoestand gevraagd te worden. De hemiparese simulator mag alleen onder vakkundig toezicht gebruikt worden.

De gewichten moeten worden verminderd voor lichamelijk zwakke personen. De hemiparese simulator is niet geschikt voor kinderen, zwangere vrouwen en oudere personen.

Reiniging

Alle onderdelen kunnen in de handwas, met lauwwarm water en fijnwasmiddel gewassen worden. Voor het wassen van de kniespalk en de gewichtsgordel dienen de gewichten te worden verwijderd.

Combinatie ouderdomssimulatorpak GERT

Bij gebruik van de hemiparese simulator in combinatie met het ouderdomssimulatorpak GERT, laat je de componenten weg aan de kant van het lichaam waar de hemiparese moet worden nagebootst.

