

QUICKSTART GUIDE

REANIMATIEPOP

BORST VOLWASSENE

(zonder monitor)



Voor je begint

Inleiding

Deze pop simuleert volwassene met een gemiddelde fysiologie en anatomie en werd ontworpen om een zo realistisch training van de basis levensreddende technieken aan te leren, voornamelijk CPR (cardiopulmonaire reanimatie).

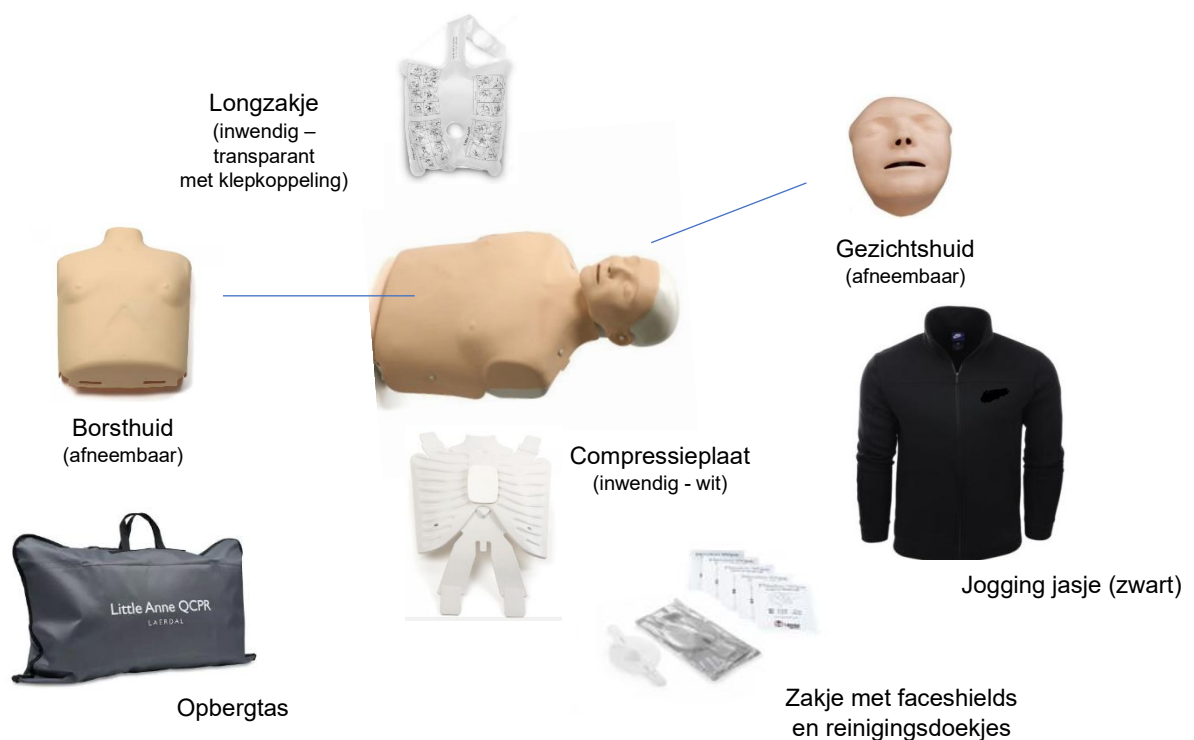
Enkele kenmerken van de pop die als hulpmiddel hiervoor dienen zijn:

- natuurlijke obstructie van de luchtweg
- realistische gelaatstrekken en beweegbare onderkaak
- realistische reactie op beademing en compressie
- het rijzen van de borst bij beademing
- realistische kenmerken voor het lokaliseren van compressiepunten
- auditieve bevestiging van de correcte compressie diepte

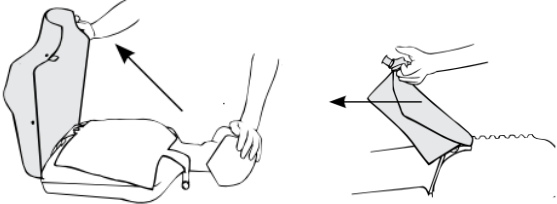
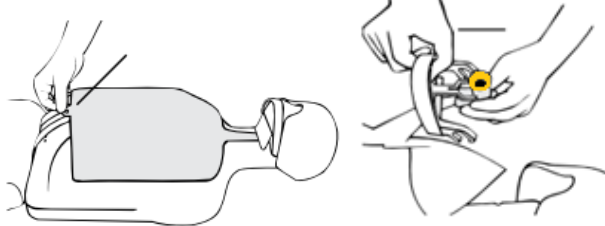
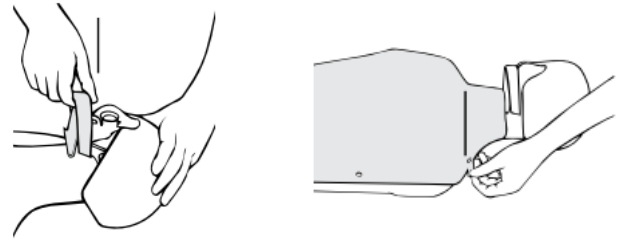
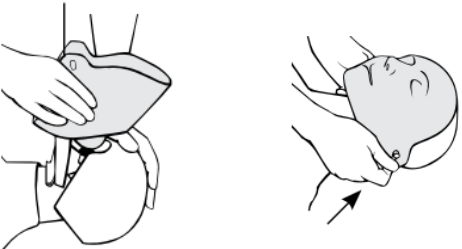
! Opgelet

- Reinig de pop vooraleer je ermee aan de slag gaat.
- Gebruik hiervoor het reinigingsdoekje of een mengsel van water en zeep.
- Gebruik geen schuurmiddelen!

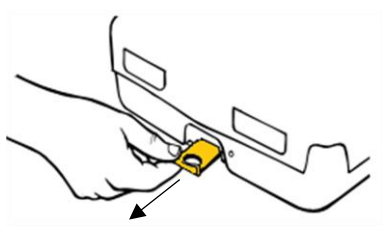
Onderdelen



Plaatsen van het longzakje

Verwijderen van het longzakje 	Verwijder de gezichtshuid – Maak de gezichtshuid aan beide oren los. – Hef ↑ de gezichtshuid van klepkoppeling
	– Verwijder de onderkaak van de kleppen in het hoofd door er voorzichtig aan te trekken ↑ – Verwijder → de klep
	– Open ↖ de borsthuid voorzichtig van de torso. – Verwijder ← de gebruikte luchtweg en werp het weg.
Plaatsen van het longzakje 	– Leg de long plat op de romp en maak vast aan de haak. – Bevestig luchtwegklep aan het kaaksbeen. Opgelet ⚠ Zorg dat het longzakje niet verdraaid is!
	– Klik het kaaksbeen terug op de kleppen in het hoofd. – Bevestig de ogen aan de borsthuid aan de vier houders
	– Duw de gezichtshuidkoppeling (rood) in luchtwegklep van het longzakje. – Maak de ogen aan de gezichtshuid vast aan de houders van het hoofd die zich aan beide oren ↗ bevinden.

De borst gebruiken...

 Klikapparaat IN	Gebruik van het klikapparaat. – Wanneer je de oefenpop uitpakt, bevindt het klikapparaat zich in de “on” stand (de hendel bevindt zich IN de pop) – De reanimatie kan beginnen.
 Klikapparaat UIT	Uitschakeling van het klikapparaat – Trek de hendel van het klikapparaat naar buiten. Opgelet ⚠ – Het klikapparaat werkt enkel met activeringsboog

Na afloop van een oefensessie

Duw het klikapparaat altijd in de “on” stand voor u de oefenpop inpakt voor transport.

Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.